

## Assortiments Avance® Solo

Référence labo	Désignation	Taille compresse	Pcs/boite	Pcs/carton
<b>Pompe, réservoir et pansement</b>				
	8881020 Avance® Solo set 10x20 cm	5x15 cm	1	2
	8881030 Avance® Solo set 10x30 cm	5x25 cm	1	2
	8881035 Avance® Solo set 10x35 cm	5x30 cm	1	2
<b>Pompe et réservoir</b>				
	8880050 Avance® Solo set pompe et réservoir	-	1	2
<b>Pansement</b>				
	881020 Avance® Solo pansement 10x20 cm	5x15 cm	2	4
	881030 Avance® Solo pansement 10x30 cm	5x25 cm	2	4
	881035 Avance® Solo pansement 10x35 cm	5x30 cm	2	4
	881515 Avance® Solo pansement 15x15 cm	10x10 cm	2	4
	881520 Avance® Solo pansement 15x20 cm	10x15 cm	2	4
	881530 Avance® Solo pansement 15x30 cm	10x25 cm	2	4
	882020 Avance® Solo pansement 20x20 cm	15x15 cm	2	4
	882525 Avance® Solo pansement 25x25 cm	20x20 cm	2	4
<b>Autres consommables</b>				
	880050 Avance® Solo réservoir 50ml	-	4	8
	882000 Avance® Solo mousse 1.5x10x12 cm	-	4	8

## Assortiments Avance® Solo Adapt

Référence labo	Désignation	Pcs/boite	Pcs/carton
<b>Pompe, réservoir et pansement</b>			
	<b>Avance® Solo Adapt Set</b> 1x pompe, 1x réservoir 50 ml avec tubulure, 4x piles AA, 1 film semi perméable adhésif siliconé Safetac 20x27cm, 1x mousse de remplissage 3x8x10cm, 1x Port de transfert avec tubulure)	1	2
	<b>Avance® Solo Adapt kit pansement</b> 1x film semi perméable adhésif siliconé Safetac 20x27cm, 1x mousse de remplissage 3x8x10cm, 1x Port de transfert avec tubulure	5	5
	994000 <b>Avance® Solo Adapt Film</b>	1	10
<b>Autre consommable</b>			
	880050 <b>Avance® Solo réservoir 50ml</b>	4	8

RETROUVEZ ET TÉLÉCHARGEZ ICI



Scannez-moi

LA FICHE DE PRESCRIPTION



Scannez-moi

LE POSTER

**Références :** 1. Avance Solo CMM Data on file ( Ref 15) 2. Avance Solo CMM Data on file (Ref 16) 3. Avance Solo CMM Data on file (Ref 10) 4. Avance Solo CMM Data on file ( Ref 23) 5. Silverstein P.et al.An open, parallel, randomized, comparative,multicenter study to evaluate the cost - effectiveness, performance, tolerance, and safety of a silver-containing soft silicone foam. Journal of Burn Care and Research ,2011 6. Bredow J.et al.Randomised clinical trial to evaluate performance of flexible self adherent absorbent dressing coated with silicone layer after hip, knee or spinal surgery in comparison to standard wound dressing. Poster presentation at WUWHS Congress, Italy,2016.

Le système Avance Solo émettra des bruits réguliers correspondant au fonctionnement de la pompe. Ces bruits sont parfaitement normaux et confirment que le système fonctionne<sup>2,5,9</sup>. En cas d'utilisation d'une mousse de comblement sous le pansement siliconé, l'interface Mepitel® peut être utilisée afin de protéger les tissus fragiles exposés (Cf notice) et d'éviter l'adhérence de la mousse au lit de plaie.

### Précautions :

Consulter un professionnel de santé en cas de problème et notamment si le patient présente des saignements, une élévation de la pression artérielle ou en cas de difficultés avec le dispositif. Pour les mises en garde et les précautions d'emploi, se référer au mode d'emploi inclus dans l'emballage du produit pour le professionnel de santé.

Mölnlycke Health Care, Avance® et Safetac®, sont des marques et des logos déposés au niveau mondial par la société Mölnlycke Health Care AB ou l'une de ses filiales. Avance Solo est un dispositif médical de classe IIb, non remboursé LPPR, fabriqué par Mölnlycke Health Care, CE 2797.

Lire attentivement la notice du produit avant toute utilisation. Mölnlycke Health Care CS 70205 13 allée du Château Blanc - 59445 Wasquehal cedex. SIRET 38319747200061 - RCS Lille Métropole 383197472. Document réservé à l'usage des professionnels de santé. communication.france@molnlycke.com - www.molnlycke.fr © Copyright (2024) Mölnlycke Health Care.



# Avance® Solo Avance® Solo Adapt

Thérapie par pression négative à usage unique avec réservoir



FRWC21572401 - 01/2024



## Une solution adaptée à tous types de plaies

Le système de TPN Avance Solo avec pansement et/ou mousse est indiqué pour les exsudats faibles à modérés pour les plaies chroniques ou aiguës, traumatiques, subaiguës et déhiscentes ainsi que de lambeaux et de greffes

### Exemple de plaie plane/creuse



Ulcère veineux

### Exemple de plaie cavitaire



Escarre



Pied Diabétique



Kyste Pilonidal



Scannez-moi  
CAS CLINIQUE



Scannez-moi  
CAS CLINIQUE

# SOLUTION EVOLUTIVE


## 3 en 1

### SOLUTION

#### 1

**Plaies planes**  
Jusqu'à 1,5 cm  
de profondeur

Avance  
Solo  
Pansement

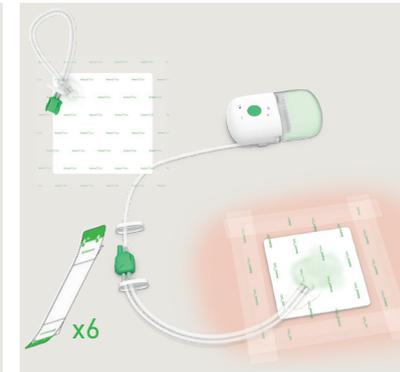


### SOLUTION

#### 2

**Plaies creuses**  
1,5cm à 2cm  
de profondeur

Avance  
Solo  
Pansement  
+  
mousse

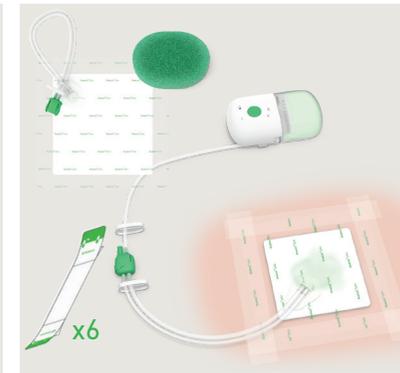


### SOLUTION

#### 3

**Plaies cavitaires**  
Profondeur  
> 2cm ou moins  
exsudatives  
ou localisations  
difficiles

Avance  
Solo Adapt  
Mousse  
+  
film

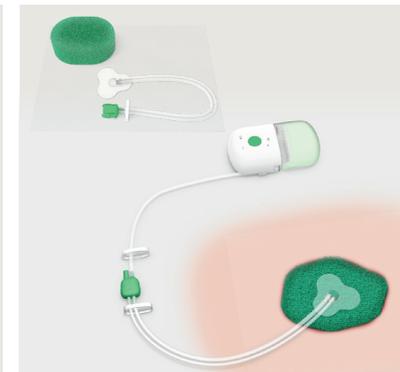

Une solution pour faciliter votre soin,  
apporter du confort au patient  
et optimiser la cicatrisation

### 1

## Pompe & Réservoir


- -125mmHg en continu sur 14 jours
- Signaux visuels et sonores<sup>1,2</sup>
- Poids < 130g = Mobilité patient<sup>3,4</sup>
- Excès d'exsudats vers le réservoir<sup>3</sup>  
= meilleure gestion d'exsudats



### 2

## Technologie CFM™

- Controlled Fluid Management
- Flux d'air contrôlé + pansement absorbant + réservoir
- = pression négative régulée et continue au site de la plaie<sup>3,4</sup>

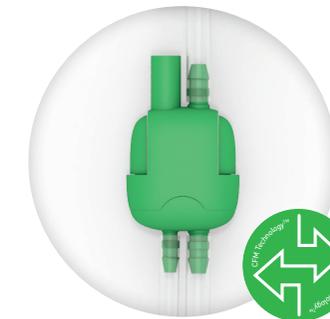

### 3

## Technologie Safetac®

- Atraumatique
- Repositionnable
- Pas de résidus
- Indolore<sup>5,6</sup>

